



全球呼气诊断事业领跑者

# HUBT-20

## 幽门螺杆菌测试仪



无痛 · 无创 · 准确 · 快速 · 简便



(资料仅供内部参考 202003版)

# HUBT-20 幽门螺杆菌测试仪

HUBT-20型是深圳市中核海得威生物科技有限公司推出的一款新型幽门螺杆菌测试仪，该机采用最新的ARM CortexM4微控制器，微控制器芯片体积小，运算速度快，系统更稳定，全方位临床扩展功能及人性化软硬件设计能更好地满足各医疗机构使用需求。

## 时尚美观的设计外观



## 前沿技术应用

- 1、电容触摸屏机型，友好的人机交互界面，更符合现代医疗检测设备的需求；
- 2、全新硬件系统设计，抗干扰能力强；
- 3、信号接受精准控制技术，提高仪器的信噪比。

## 更全面地满足临床需求

- 1、可单机操作，也可通过USB端口连接上位机，临床检测数据可直接保存至上位机；
- 2、报告单打印的数据内容更丰富，信息量更全面；
- 3、仪器可自动检测，保证仪器的稳定性；
- 4、软件升级，满足临床使用不同的需求。



## 吹气查疾病 诊断更容易




### 任何环境下 HUBT-20都是您的好帮手



#### 完善的数据管理系统

- 1、大容量存储TF卡8G，可储存大量的受检者信息；
- 2、可连接上位机，成为一体化工作站；
- 3、可满足住院、门诊、大型流行病学调查等检查需求。

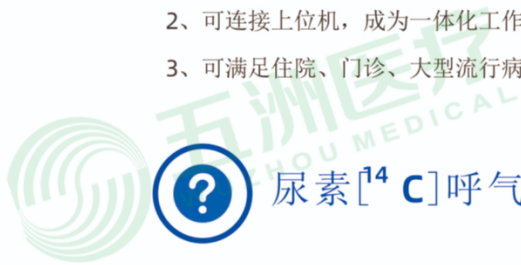

#### 尿素<sup>[14C]</sup>呼气试验操作示意图



1 步骤  
受试者空腹或进食两小时后，用适量饮用水送服一粒尿素<sup>[14C]</sup>胶囊；

1



4



4 步骤  
将集气卡交由医护操作人员，操作者将集气卡插入仪器测量室内，即可进行测量，测量后仪器将显示并打印出结果。



2 步骤  
静坐15分钟，期间不要喝水或进食；


2

3



3 步骤  
开启集气卡，将吹气嘴插在集气卡上，含住吹气嘴，平缓吹气，连续吹气约3分钟，当指示窗口颜色完全变黄，可停止吹气；



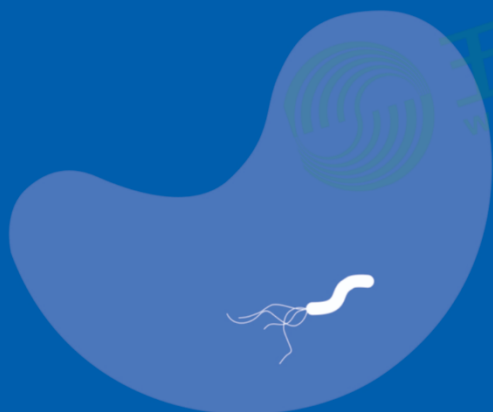

/ 将呼气诊断事业产业化 /  
/ 使人类对健康的追求更轻松 /

注册地址：深圳市南山区深南大道高新技术产业园南区R1-B栋6楼

生产地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区卢田路5号

联系电话：400-992-8880

网址：[www.headwaychina.com](http://www.headwaychina.com)

